

PETITES PIECES OPERATOIRES

*Prélèvement cutané, appendice,
vésicule, résection des polypes...*

- Immerger le prélèvement dans un flacon de formol à 20 ml, 60 ml ou 120 ml selon la pièce à traiter.
- Avant expédition, s'assurer que le flacon est bien fermé et identifié puis le placer dans un grand sac orange fourni pour éviter les fuites.

PIECES OPERATOIRES VOLUMINEUSES

*Mastectomie, colectomie, pneumectomie,
hystérectomie, placentas...*

- Immerger le prélèvement dans un récipient de formol de taille suffisante pour l'accueillir : pots de 1 litre ou 5 litres.
- Avant expédition, s'assurer que le pot est bien fermé et identifié puis le placer dans un grand sac orange fourni pour éviter les fuites.